

OvaCyte™ Pet

Análisis fecal basado en IA y sin complicaciones.

OvaCyte Pet ofrece identificación inmediata de parásitos fecales. Sin complicaciones, la sencilla preparación de la carga de la muestra lleva menos de 2 minutos. Totalmente automatizado, el análisis digital de la muestra con IA permite decidir tratamientos en tiempo real mediante resultados precisos y fiables.

Preparación de la muestra sin complicaciones, sólo cargar y listo

El sistema cerrado y fácil de usar de OvaCyte Pet permite que la muestra esté lista en el analizador en menos de 2 minutos. No hay pesado, maceración ni centrifugación manual aparte, lo que significa que no hay olores ni complicaciones.

Calidad de laboratorio en la clínica

El nuevo y totalmente automatizado método de OvaCyte Pet, junto con el análisis digital basado en IA ofrece resultados precisos y fiables.

Decisiones de tratamiento más rápidas y con mejor información

OvaCyte Pet proporciona resultados rápidos y prácticos durante la consulta, eliminando las dudas del tratamiento. OvaCyte Pet le ayuda a tomar decisiones precisas y rápidas, evitando tratamientos innecesarios.



Resultados prácticos con calidad de laboratorio. En la clínica y en tiempo real.



ANCILOSTÓMIDOS

ASCÁRIDOS

TRICÚRIDOS

PARÁSITO
PULMONARES

COCCIDIOS

GIARDIA*

Canino y felino:
Ancylostoma spp.,
Uncinaria stenocephala

Canino y felino:
Toxascaris leonina
Canino: *Toxacara canis*
Felino: *Toxacara cati*

Canino:
Trichuris vulpis

Canino:
Capillaria aerophila


Canino y felino:
Cystoisospora spp.

OvaCyte Pet es tan fácil como A, B, C.




A. Preparación

Nuestra herramienta OvaPrep hace que la preparación de las muestras sea extremadamente sencilla, limpia y rápida, en menos de 2 minutos de su tiempo. Utilice la herramienta para obtener la muestra fecal, no es necesario pesarla. Insértela en el dispositivo, agregue fluido de flotación y recójala con una jeringa. Insértela en el casete.

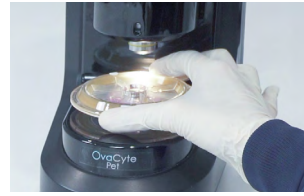

B. Cargar y listo

Cargue el casete en el OvaCyte Fecal Analyzer e inicie el escaneado. El escaneado, el análisis y el informe están totalmente automatizados. El software de reconocimiento de imágenes basado en IA identifica las especies de parásitos en la biblioteca de imágenes y el número de huevos u ooquistes parasitarios presentes.

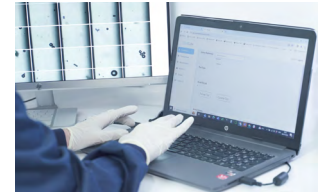

3. Obtener resultados

En pocos minutos, los resultados y todas las imágenes del escaneado estarán disponibles en la aplicación web OvaCyte en su ordenador o teléfono móvil.

Información del producto

Producto	Descripción breve y contenidos	Código de promoción
OvaCyte Pet Fecal Analyzer	Dispositivo compacto con pantalla táctil integrada; incluye cables de alimentación, adaptador de corriente, dispositivo de bloqueo y cable Ethernet	TN-PET-AN
OvaCyte Pet Test Kit and OvaPrep	40 x Casetes OvaCyte Pet, 40 x OvaPrep y 1 litro de fluido de flotación OvaCyte Pet	TN-PET-TK
afosa Giardia Ag Rapid Test	Inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral para la detección rápida de antígenos de <i>Giardia</i> en heces de perros o gatos	AF8210135 (10)
afosa CCV/CPV/Giardia Ag Rapid Test	Inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral para la detección de <i>Coronavirus Canino</i> (CCV), <i>Parvovirus Canino</i> (CPV), y antígenos de <i>Giardia</i> en heces de perros	AF8210333 (5)

Los productos no están diseñados para el diagnóstico, la prevención o el tratamiento de una enfermedad.

Experimente el análisis fecal sin complicaciones



Escanee el código QR para saber más sobre OvaCyte Pet, concertar una demostración o recibir nuestra exclusiva oferta inicial.

Póngase en contacto con nuestros especialistas: www.indical.com

E-mail: rosa.oliveira@indical.com | Teléfono: +34 647 589 423

Conecte con nosotros en LinkedIn: www.linkedin.com/company/indical

Los productos no están diseñados para el diagnóstico, la prevención o el tratamiento de una enfermedad. Para obtener información actualizada sobre licencias y el descargo de responsabilidad específico del producto, consulte el respectivo folleto o manual de usuario. Los requisitos reglamentarios varían según el país, es posible que los productos no estén disponibles en su zona geográfica. Marcas comerciales: INDICAL® (INDICAL BIOSCIENCE GmbH); OvaCyte™ (Telenostic Ltd.). Los nombres, marcas comerciales, etc. que están registrados y se utilizan en este documento, incluso cuando no estén marcados específicamente como tales, no se pueden considerar desprotegidos por la ley. Las imágenes del producto pueden diferir del producto real. INFLY-OvaCyte-Pet-ESP-240923 © 2024 INDICAL BIOSCIENCE